

FICHA TÉCNICA



Producto: Incentivo Respiratorio

Referencia: FM-21

Marca: RSB

Características: Dispositivo diseñado para ejercitar los músculos inspiratorios mediante una respiración profunda y controlada que permite expandir y llenar los pulmones de aire. Sus funciones permiten formar pulmones más fuertes y resistentes, tener una respiración más fácil y adecuada, mejorar el rendimiento, la resistencia física y disminuir la fatiga.

Uso: El ejercicio consiste en inhalar profundamente por la boca para elevar y sostener el estímulo -la bolita de color- en el nivel deseado, cuanto más profunda sea la inhalación, más tiempo y más alto permanecerá sostenido el estímulo. El uso del incentivo le ayudará a incrementar su capacidad pulmonar, abrir las vías respiratorias y evitar que se acumule líquido o mucosidad en los pulmones, todo esto, hará que respirar sea mucho más fácil.

REGISTRO INVIMA 2019SDM-0004131-R1

Especificaciones:

Incluye: tubo principal, base, manguera, boquilla, columna indicadora y estímulo (bolita).

Riesgos: La reutilización del producto puede causar transmisión de enfermedades infectocontagiosas, su uso está restringido a criterio médico en pacientes con heridas a nivel la boca.

Manipulación segura: el producto una vez extraído de su envase debe usarse lo más rápido posible para evitar su contaminación.

Almacenamiento: el producto se puede almacenar a temperaturas entre 5°C a 25°C y humedades relativas de 0% a 70%. Evitar la exposición a fuentes de calor y contacto con solventes orgánicos. No almacenar al aire libre ni a la luz solar.