

FICHA TÉCNICA



Producto: Inhalocámara

Referencia: FM-09 adulto/FM-09A
pediátrica

Marca: RSB

Características: Dispositivo diseñado para la administración óptima de medicamentos en aerosol, su utilización mejora la coordinación y permite el paso de partículas terapéuticas más pequeñas. La inhalocámara previene la pérdida del medicamento durante la inhalación y disminuye la presión del impacto del aerosol inhalado en la cavidad bucal y faríngea.

Uso: es necesario agitar el inhalador antes de retirar su tapa; luego, adáptelo en el orificio elástico de la inhalocámara y acomode suavemente la mascarilla sobre la cara de quien lo va a utilizar, posteriormente, presione el aerosol que se encuentra conectado y permita que el paciente realice unas cuantas respiraciones.

REGISTRO INVIMA 2011DM-0007444

Especificaciones:

Riesgos: Todos los dispositivos para el sistema respiratorio son de uso único por paciente, no deben ser reusados.